

Aerolet[®] toiletlift

verticaal



Bediening- en
installatiehandleiding

Specificaties

Gegevens van uw eigen toiletlift hieronder in sticker (zie geplakte sticker op lift) invullen:

Aerolet® Toiletlift	Type :
	Serie no. :
Economic-Holland	Bouwjaar : 
Hanzestraat 12 B	Max.belasting: 150 /250Kg
7622 AX BORNE	U.in : 100-230 V~ 50/60 Hz
tel: 074-3030247	I.in : max. 3.9 A
economic-holland.nl	Afdicht klasse : IP X4
Patient Care Systems	
 Voor ingebruikname handleiding goed doorlezen!	  

Afmetingen:

Verticaal - Standaard

Breedte 69 cm
Diepte 56 cm

Max. zithoogte: bij closetpot 40 cm = 80 cm
bij closetpot 50 cm = 90 cm

Hoogte instellingen:

Closetpot hoogte : 39,5 - 52 cm
Armsteunen : 73 - 113 cm
Onderbeenlengte : 36 - 53 cm

Eigen gewicht : 32 kg
Lengte aansluitsnoer : 275 cm

Max. hef gewicht : 150 kg

Max. hef gewicht : 250 kg (Aerolet type Bariatric)

Voorwoord

Geachte gebruik (ster)er,

®

De aan u op maat geleverde Aerolet® toiletlift is een jaren lange ontwikkeling aan vooraf gegaan waardoor het een 1e klas kwaliteitsproduct is geworden, bedoeld voor vele jaren veilig toiletgebruik. Met de zogenaamde multi-instelling kan de Aerolet toiletlift worden afgesteld op de onderbeenlengte én op de mate van rompstabiliteit van de gebruiker.

De Aerolet toiletlift biedt de ideale ondersteuning bij de opsta-beweging; hierbij wordt de romp voorwaarts bewogen en het zwaartepunt boven de voeten gebracht, terwijl knie- en heupgewricht zich synchroon strekken. De geleverde toilet-lift is gebaseerd op maatwerk.


Na de installatie van uw toiletlift door een revalidatie-leverancier c.q. door een loodgieters- of installatiebedrijf, is de Aerolet gebruiksklaar. De juiste multi-instelling voor uw opsta- en zit beweging is reeds bewerkstelligd.

De navolgende handleiding geeft u een goede instructie hoe u in de praktijk vertrouwt zult raken met uw toiletlift. De maximale levensduur is gebaseerd tussen de 10 tot 12 jaar.

De Aerolet hindert het normale toiletgebruik door validen niet. Men dient dan de toiletzitting op normale zithoogte terug te brengen.

Wij wensen u een veilig toiletgebruik met de Aerolet toiletlift.

Basis opbouw van de Aerolet Toiletlift

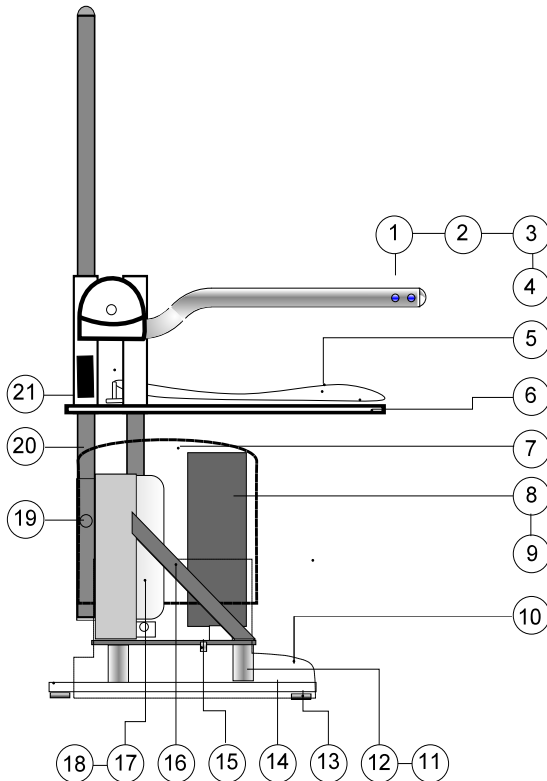

- | | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| 1 armsteun rechts met bediening | 13 stelpeet (2x voor - 2x achter) |
| 2 armsteun rechts en opklapbaar | 14 vloerframe R links en rechts |
| 3 armsteun links met bediening | 15 aarde aansluitklem |
| 4 armsteun links en opklapbaar | 16 hoofdframe B links en rechts |
| 5 toiletzitting | 17 actuator links |
| 6 zitframe | 18 actuator rechts |
| 7 boven afdekkap L + R | 19 positie schroef links en rechts |
| 8 cotrolebox | 20 geleidingsbuis links en rechts |
| 9 back-up accu in andere unit | 21 type plaatje |
| 10 voet afdekkap L + R | |
| 11 adaptor K + 6 cm (46 wc) | |
| 12 adaptor K +10 cm (50 wc) | |

Links en rechts is gezien vanuit zitpositie op de lift.!

Belangrijke informatie



De installatie en veranderingen van instellingen aan de lift mogen **alléén** door een **geautoriseerd persoon** uitgevoerd worden.

Zorg dat de lift stroomloos bij handelingen aan de lift.



Uw Aerolet toiletlift is beslist **géén** kinderspeelgoed !



Waarschuwing

Het niet opvolgen **van deze aanduiding**, kan ongelukken veroorzaken met kans op letsel.



Het niet opvolgen **van deze aanduiding**, kan leiden tot schade aan de lift.




Gevaar voor hand beklemming.




Wanneer de toilet- en/of douchelift buitengebruik worden gesteld dient de netspanning 220V te worden verbroken.
De lift in een droge omgeving opslaan!

Bediening van de Aerolet® toiletlift

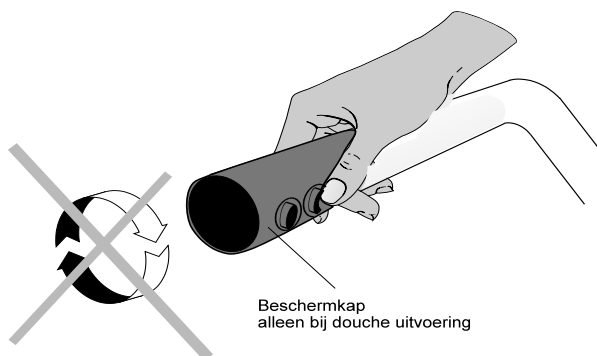

Beschermkap
alleen bij douche uitvoering

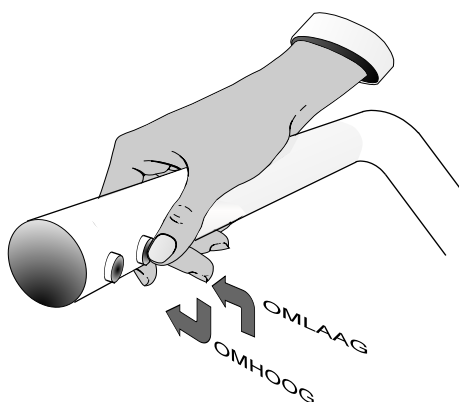

Gevaar voor handbeklemming

Bij het omhoog of omlaag bewegen van de lift moeten de hand (en) op de armsteun (en) of op schoot geplaatst worden, zodat deze niet bekneld kunnen raken tussen zitframe en toiletpot.



De beschermkap (alléén bij douchelift uitvoering) niet verdraaien omdat dan beiden bedieningsknoppen tegelijk ingedrukt kunnen worden, waardoor de lift niet meer werkt.

Bediening van de Aerolet[®] toiletlift

De lift wordt in werking gesteld d.m.v. twee licht werkende drukknoppen. Deze bevinden zich aan de binnen- of buitenzijde van één van beide armsteunen.

- VOORSTE KNOP = OMHOOG
- ACHTERSTE KNOP = OMLAAG
- De Aerolet[®] stopt automatisch op de van te voren ingestelde hoogte.
- Tevens stopt de lift direct bij het loslaten van de drukknoppen.
- Bij het omlaag gaan moet de drukknop net zolang in gedrukt worden totdat het zit-frame met toiletzitting niet verder zakt. Hierdoor wordt het aandrijf systeem van de lift iedere keer gekalibreerd . Indien de lift op een Geberit of een Closomat model gemonteerd is , wordt bij deze laagste stand een schakelaar in werking gezet, waardoor het spoel, was - en droogstelsel kan werken.



Als beide knoppen worden ingedrukt stopt de lift. Om de lift weer in werking te stellen moeten deze beiden knoppen losgelaten worden.


Batterij back-up (optie bij voorkeur bestellen af fabriek)

1. Met de batterij blijft de lift (op halve kracht) bij stroomuitval werken
2. Geladen batterij is goed voor ongeveer 15 toilet gangen.
3. De batterij wordt automatisch bij opheffing stroomuitval weer opgeladen.

INSTALLATIE AEROLET VERTICALE TOILETLIFT

Aansluiting 230 Volt


- ① *Verwijder de bestaande toiletzitting

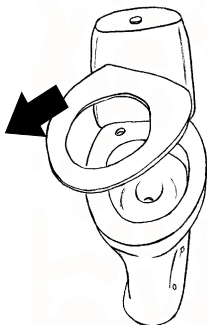

②



* Breng de lift omhoog

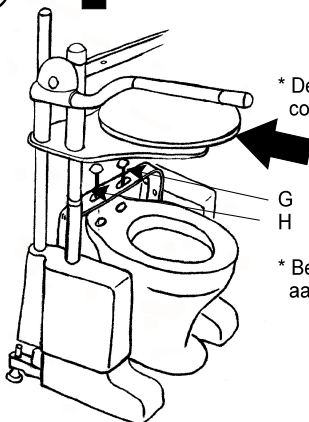


* De lift over de cosetpot zetten.

* Bevestig de beugel aan de cosetpot


③

*Kappen A en B omhoog schuiven

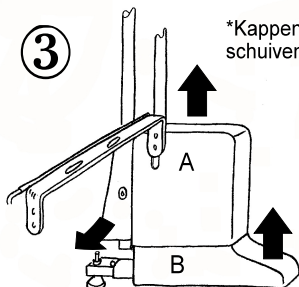


④

* Pootjes afstellen en goed borgen met moeren (4x)

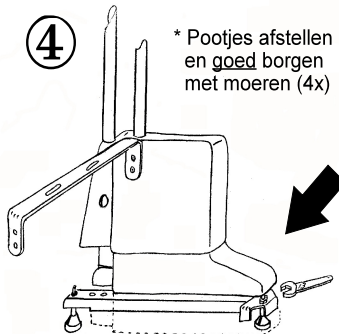

⑤

* Kappen A en B weer naar beneden drukken

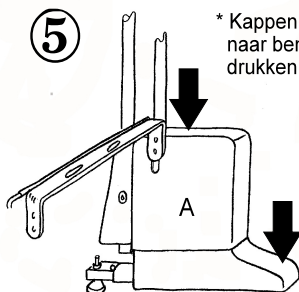

⑥


* De toiletlift is klaar voor gebruik






Het plaatsen van de Aerolet® toiletlift op de closetpot (vloer / wand model)

Waarschuwing

- Aangezien de toiletlift op een closetpot wordt bevestigd, maakt deze closetpot deel uit van het systeem. Zorg er dus voor dat de closetpot zeer goed aan de vloer is verankerd.
- Verwijder de zitting van het bestaande of nieuwe closet (Fig. 1)
- Sluit de lift aan op 230 Volt en breng het zitframe ca.10 cm omhoog zodat de verbingsstrip zichtbaar wordt
- Druk de 2 stabiliteitsbusjes **G** in de bevestigingsgaten van de closetpot (Fig.2). Eventueel passend maken door de busjes voorzichtig bij te snijden.
- Maak de verbingsstrip met de slotbouten **H** aan de closetpot vast. (Fig 2.) Eventueel de 4 stelootjes in- of uitdraaien zodanig dat deze met vloer goed contact maken (Fig.4).
- Staat de lift op de juiste hoogte draai dan vervolgende contra-moeren goed vast (Fig.4).
- Der toiletlift is klaar voor gebruik (Fig.6).

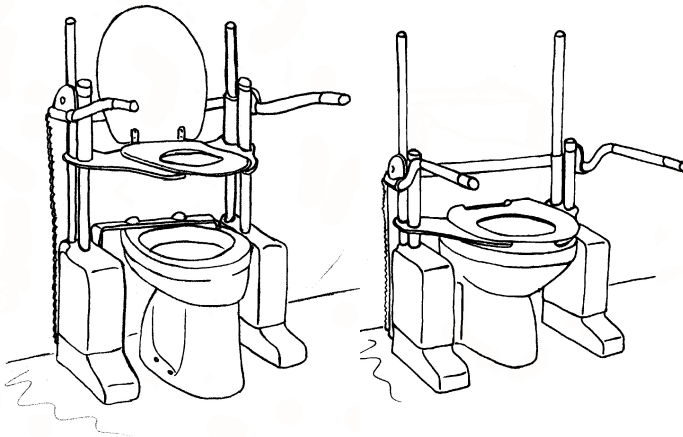

Verticaal

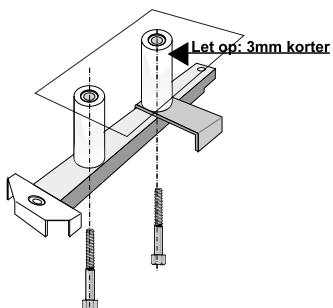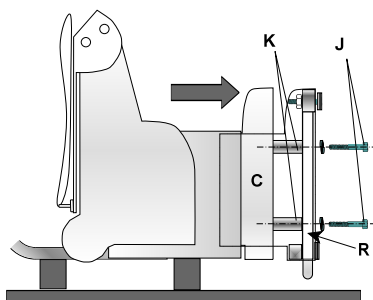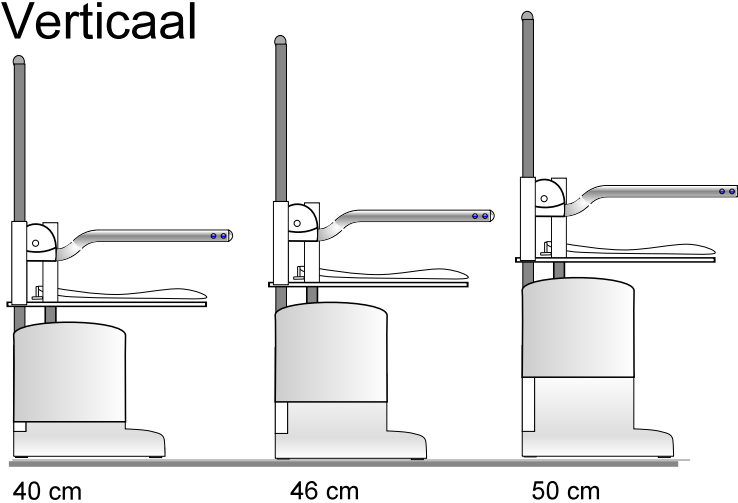

Het plaatsen van de Aerolet® toiletlift op een “hoog” closet

! Bepaal vóór het installeren cq. bestellen van de Aerolet wat de hoogte van het closet is.

- De hoogte van de Aerolet® is te verstellen d.m.v. adapter-bussen **K**.
- Kantel de lift voorzichtig naar achteren en zorg er voor dat vloerframe **R** vrij van de grond ligt. Gebruik hiervoor een paar blokjes.
- Draai de huidige vier boutjes los.
- Maak voetkap **C** los van het vloerframe **R** door de klittenband-verbinding te verbreken.
- Plaats de adapter-bussen **K** met de meegeleverde bouten **J** tussen frame en aandrijfunits. (zie detail)
- Schuif kap **C** over vloerframe **R** en druk de klittenband-verbinding vast.
- Zet de lift rechtop en plaats hem op het closet en volg verder de plaatsing-procedure in dit boekje.
- LET OP: DE ACHTERSTE ADAPTER BUSSEN ZIJN 3 MM KORTER EN WORDEN GEMONTEERD MET DE METALEN STEUN-BEUGEL (Zie tekening pag.10)

Onderhoud en service

- Het uiterlijk van de lift bestaat uit zoveel mogelijk rondingen, welke het schoonhouden vergemakkelijkt.



Waarschuwing

Tijdens het reinigen van de lift, stekker uit het stopcontact verwijderen.

- De lift en de toiletzitting is bestand tegen alle normale huishoudelijke reinigingsmiddelen.



Echter **géén** schoonmaak middelen gebruiken welke chloor en /of zoutzuur (kalkoplossers) en schuurmiddelen bevatten.



Waarschuwing

De lift mag **nooit** met water overgoten worden of met een hoge drukreiniger gesproeid worden.

Niet onder de afdekkappen met vloeistoffen reinigen.

De lift kan met een vochtige doek aan de buitenzijde gereinigd worden.



De lift behoeft **géén** periodieke inspectie en is onderhoudsvrij wat betreft mechanische onderdelen.



Op de lift kunnen alleen toiletzittingen van het merk "PRESSALIT " toegepast worden i.v.m. bevestiging aan het frame.



Bij beschadiging toiletzitting direct laten vervangen door geautoriseerd vakpersoon.



Bij **herplaatsen** van de lift: de lift laten onderwerpen aan inspectie en testen, welke in overleg met ons en een dealer uitgevoerd kan worden.

Oplossen van problemen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Actie
De lift werkt niet	- Niet aangesloten op lichtnet - Zekering is kapot - Aardlekschakelaar is uit - Controlebox defect	- Aansluiten op het lichtnet - Zekering vervangen, wanneer het systeem is aan gesloten op een aparte groep. - Schakelaar aanzetten - Controlebox opsturen voor reparatie
Voedingslampje brandt maar de actuator werkt niet. Relais in controlebox klikken wel.	- Actuator plug zit niet goed in controlebox. - Actuator defect - Controlebox defect	- Actuatorplug goed in controlbox duwen. - Actuator defect. - Controlbox defect. - Actuator vervangen. - Controlebox vervangen.
Voedingslampje brandt, maar actuator werkt niet. Relais in controlebox maken geen geluid.	- Controlebox defect - Handbediening defect	- Controlebox opsturen voor reparatie - Handbediening voor reparatie opsturen
Lift komt niet meer omhoog of omlaag	- Geen stroom of de lift is niet aangesloten	- lift aansluiten
Lift staat scheef	- lift is een zijdig belast - lift werd aan één zijde tegen gehouden	- blijf de zwarte knop pulserend indrukken tot dat de lift weer recht staat Zie pag. 15 fig. 6.
Lift maakt zwaar geluid bij het op en naar gaan	- de geleidingstangen zijn vet en/of vuil	- stangen schoon en vet vrij maken met b.v. wasbenzine Zie pag. 15 fig. 5

Garantie en reparatie

Economic Holland b.v. garandeert de Aerolet® toiletlift tegen materiële en fabricagefouten voor een periode van één jaar vanaf aankoop door de eindgebruiker.

De garantieperiode begint ofwel op de datum van aflevering, of op de installatiedatum, wanneer de installatie door Economic Holland of door een geautoriseerde dealer is uitgevoerd.

Gedurende deze garantieperiode zal Economic Holland of een geautoriseerde dealer naar eigen keuze de onderdelen die gebreken vertonen, repareren of vervangen.

Uitsluitingen

De garantie op uw Aerolet toiletlift is niet van toepassing op defecten die het gevolg zijn van het volgende:

- Verkeerd of ontoereikend onderhoud van de gebruiker.
- Niet geautoriseerde verstellingen en/of aanpassingen of verkeerd gebruik.
- Gebruik buiten de omgevingspecificaties waarvoor het produkt bedoeld is.

Reparaties

De Aerolet® toiletlift mag alléén gerepareerd worden door Economic Holland of door een geautoriseerde dealer.

Onderdelen die onder garantie gerepareerd worden, dienen naar Economic Holland retour gezonden te worden.



Waarschuwing

Wanneer de lift niet geautoriseerd geopend wordt, bestaat het risico op storingen en kan de garantie komen te vervallen.

Belangrijk

!
GEEN OLIE OF VET GEBRUIKEN
Houdt de geleiders schoon

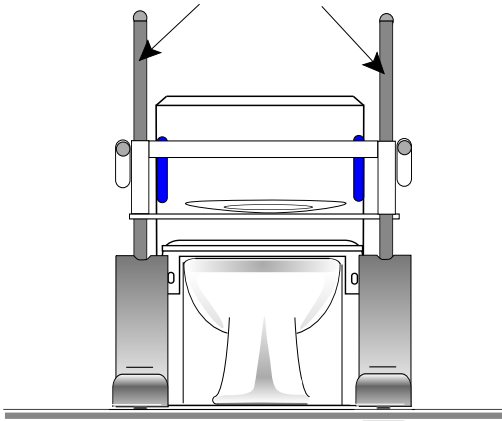


Fig. 5

Blijf pulserend op de zwarte knop drukken (neer gang) tot dat de lifts weer horizontaal staat. Zorg dat na iedere toiletgebruik de lift in zijn laagste stand is geweest, zwarte knop nog een keer na drukken als de laagste stand is bereikt.

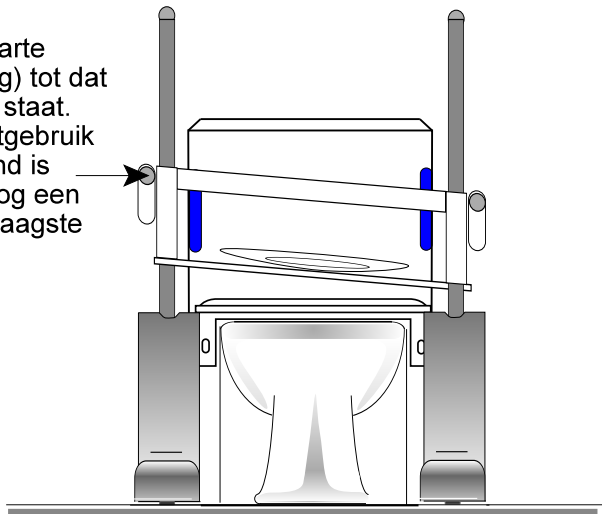


Fig. 6

Producent:



ECONOMIC HOLLAND

Hanzestraat 12 B

7622 AX BORNE

Telefoon : 074-3030247


E-mail : info@economic-holland.nl

Internet : www.economic-holland.nl

Patient Care Systems

Dealers/

Verkoop :

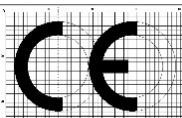

Kwaliteitsinstituut
voor
Toegepaste
ThuisZorgvernieuwing

KITZ
INNOVATIE
1997 PRIJS

Erkening
Goed
Industrieel
Ontwerp



Economic Holland behoudt het recht technische wijzigingen door te voeren!